

Inhaltsstoffe:

Wasser, Propylenglykol, Milchsäure,
Methylhydroxypropylzellulose, Natriumlaktat, Glykogen. pH 3,8

Warnhinweise:

Beschädigte Tuben nicht verwenden. Nach dem angegebenen Ablaufdatum nicht mehr verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind. Nicht bei Kindern anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Balance Activ Vaginalgel kann während der Schwangerschaft angewendet werden. Bei Verdacht auf eine vaginale Infektion während der Schwangerschaft sollte jedoch ein Arzt aufgesucht werden. Wenden Sie Balance Activ nicht an, wenn Sie schwanger werden möchten, da der niedrige pH-Wert des Gels die Spermien ungünstig beeinflussen kann. Nicht zur Empfängnisverhütung verwenden.

Vertrieb in Österreich:

Germania Pharmazeutika
GmbH,
Schuselkagasse 8,
1150 Wien

Hersteller:

Rolf Kullgren AB,
Ågatan 4,
646 30 Gnesta,
Schweden



Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.balanceactiv.com



Balance Activ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Venture Life Healthcare Ltd.

©Venture Life Healthcare Ltd., alle Rechte vorbehalten.



0344

34169-01

7 x 5 ml Einwegtuben



Zur Behandlung von bakterieller Vaginose

Klinisch geprüft, zur Behandlung bakterieller Vaginose (BV) durch Wiederherstellung des natürlichen pH-Wertes und der Scheidenflora, sowie zur Linderung der Symptome.

Balance Activ Vaginalgel

hilft auf natürliche Weise und bietet eine zuverlässige Alternative zu einer Antibiotika-Therapie. Die Wirksamkeit des Vaginalgels wurde bestätigt, Sie können damit Ihre vaginale Gesundheit unterstützen.

Eine von drei Frauen entwickelt im Laufe ihres Lebens eine bakterielle Vaginose.

Was ist bakterielle Vaginose (BV)?

Eine BV tritt häufig auf, wenn sich das natürliche Gleichgewicht der Scheidenflora verändert.

Dank der natürlichen Besiedelung mit Bakterien, ist ein gesundes Scheidenmilieu sauer. Wird diese Scheidenflora reduziert, können sich andere Bakterien vermehren und eine BV auslösen. Typische Symptome sind abnormaler Ausfluss, unangenehmer Geruch und Unbehagen.

Wodurch wird eine BV ausgelöst?

Viele Faktoren, wie z.B. die Menstruation, Geschlechtsverkehr, die Verwendung von Hygieneprodukten im Intimbereich oder zu häufiges Waschen, haben Einfluss auf den pH-Wert der Scheide. Auch Antibiotika und die Verwendung von Intrauterinpressaren (IUD, z.B. Spirale) können die natürliche Balance des Scheidenmilieus beeinträchtigen.

Balance Activ Vaginalgel hat sich bewährt und wurde klinisch getestet.

Klinische Studien haben gezeigt, dass die Formulierung von Balance Activ Vaginalgel sicher und effektiv den pH-Wert der Scheide wiederherstellt und aufrechterhält.

Balance Activ Vaginalgel enthält Milchsäure, die unangenehmen Geruch wirksam neutralisiert und den normalen pH-Wert in der Scheide auf natürliche Weise wiederherstellt. Sie ersetzt die fehlende körpereigene Milchsäure, wenn die Scheidenflora beeinträchtigt ist.

Das Vaginalgel enthält zusätzlich Glykogen, das den vorhandenen Milchsäurebakterien als Nährstoff dient und somit auch die Wiederherstellung des natürlichen pH-Wertes unterstützt (der pH-Wert von Balance Activ Vaginalgel liegt zwischen 3,7 und 3,9, angepasst an ein gesundes Scheidenmilieu). Der normale pH-Wert und der Nährstoff Glykogen fördern das Wachstum der schützenden Milchsäurebakterien, dadurch werden die Symptome gelindert und die natürliche Balance des Scheidenmilieus wiederhergestellt.

Wie wird Balance Activ Vaginalgel angewendet?

Dosierung:

Behandlung:	
Zur raschen Linderung einer BV mit abnormalem Ausfluss, unangenehmem Geruch und Unbehagen.	Verwenden Sie eine Tube täglich über 7 Tage vor dem Schlafengehen.
Aufrechterhaltung:	
Bei Wiederauftreten der Symptome oder wenn Sie eine Beeinträchtigung Ihres Scheidenmilieus vermuten, können Sie Balance Activ Vaginalgel anwenden, um den natürlichen pH-Wert und die Scheidenflora wiederherzustellen.	Wiederholen Sie die Behandlung und verwenden Sie eine Tube täglich über 7 Tage vor dem Schlafengehen.

Balance Activ Vaginalgel ist einfach anzuwenden

Drehen Sie die Verschlusskappe ab



Am angenehmsten ist es, wenn Sie Balance Activ Vaginalgel vor dem Schlafengehen in einer bequemen liegenden Position anwenden. Drehen Sie die Verschlusskappe ab, führen Sie den gesamten Tubenhals in ihre Scheide ein und drücken Sie den Inhalt heraus. Ziehen Sie die noch zusammengedrückte Tube wieder heraus und entsorgen Sie diese. Verwenden Sie eine Slipeinlage, da es sein könnte, dass Sie einen leichten Ausfluss haben. Sollte dies der Fall sein, können Sie davon ausgehen, dass das Balance Activ Gel effektiv wirkt.

Balance Activ Vaginalgel ist in hygienischen Einwegtuben abgefüllt. Es kann auch während der Menstruation und während einer Schwangerschaft angewendet werden. Bei Verdacht auf eine vaginale Infektion während der Schwangerschaft sollte jedoch ein Arzt aufgesucht werden. Balance Activ Vaginalgel kann ein Stechen, Brennen oder Juckreiz verursachen, wenn die Vaginalschleimhaut rissig ist. Das tritt nur vorübergehend auf. Bei anhaltenden Beschwerden beenden Sie die Anwendung und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Wann sollten Sie einen Arzt aufsuchen?

Ein Arzt sollte aufgesucht werden, wenn sich Ihre Symptome verschlimmern, Schmerzen auftreten, die Beschwerden nicht aufhören, bei blutigem Ausfluss oder wenn der Ausfluss in den Wechseljahren auftritt. Bei Verdacht auf eine vaginale Infektion während der Schwangerschaft sollte jedoch ein Arzt aufgesucht werden. Wenn nach Anwendung von Balance Activ Vaginalgel keine Besserung der Symptome auftritt, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen und um Rat fragen.